

TJ 系列血压袖套使用说明

声明:

本产品及其使用说明书的知识产权属于深圳市泰嘉电子有限公司（简称泰嘉电子，英文 TJ）。未经泰嘉电子书面许可，任何个人和组织不得复制、修改或翻译本使用说明书。

本说明书详细地介绍了产品的用途、功能和操作使用。使用本产品之前，请认真阅读并理解本说明书中的内容，以保证能够正确地使用本产品，并确保病人和操作者安全。

在下列条件都满足的情况下，泰嘉电子将对产品的安全性、可靠性和性能负责：

- 按照《使用说明书》使用本产品。
- 非人为因素造成的产品损坏，人为因素是指不小心摔落、蓄意破坏等。

若需要退货时，请联系泰嘉电子业务部，告知产品型号和系列号，并简述原因；如果产品系列号模糊不可辨认，退货请求将不予接受。



此标志是泰嘉电子的注册商标。

产品名称：TJ 系列血压袖套

产品型号：见产品标签上的标注

产品适用范围（见下表）

产品编码	产品规格	测量尺寸范围（臂围或腿围）	兼容设备	使用部位
TJ-NIBP003-01	婴儿袖套	10cm-19cm	臂式血压计或监护仪	臂或腿
TJ-NIBP003-02	儿童袖套	18cm-26cm	臂式血压计或监护仪	臂或腿
TJ-NIBP003-03	成人袖套	25cm-35cm	臂式血压计或监护仪	臂或腿
TJ-NIBP003-04	大成人袖套	33cm-47cm	臂式血压计或监护仪	臂或腿
TJ-NIBP003-05	成人大腿袖套	46cm-66cm	臂式血压计或监护仪	臂或腿

产品注册证书号：粤深食药监械（准）字 2013 第 1200023 号

产品执行标准号：YZB/粤深 0023-2013

产品预期用途



TJ 系列血压袖套是用于医院中对病人血液高低进行测试，为医护人员提供病人生理信息，有关具体的兼容设备型号信息及功能和兼容性，请查看“TJ 系列产品兼容血氧设备表”。

产品的工作原理、功能、结构：

本产品可以测量患者的动脉血流量，通过血压计或多参数监护仪显示血压参数，它是通过绑住人体的部位，将血压传感器放入绑带内，再通过输入外力气压，由气压传感控制动脉血液流量的大小，最后在血压计上显示数据，医护人员将数据记录存档。

本产品由绑带、导气管、气囊共三部份组成。

产品结构见示意图：

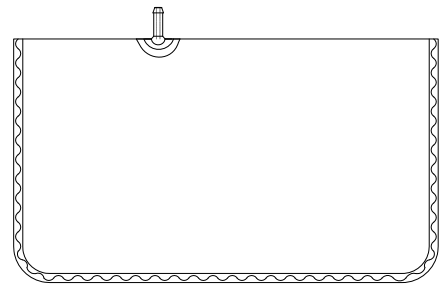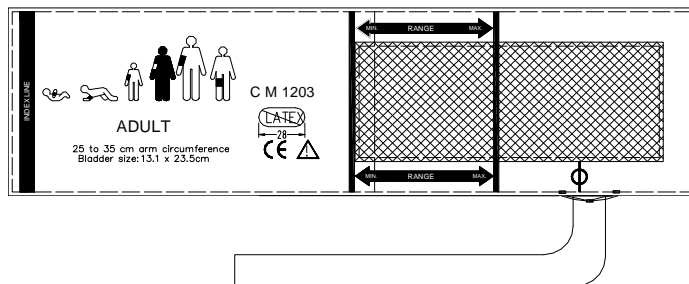

产品主要技术参数：

1. 气囊使用寿命 3 万次以上。
2. 导气管与气囊接头强度：3-5KN 拉力无漏气。

产品使用的工作环境要求：

环境温度：0℃～45℃；
相对湿度：≤95%；

操作规范要求

1) 初次使用找开包装前, 请检查包装物是否齐全:

产品 1PCS
产品使用说明书 一份

- 2) 选择一个合适的放置袖套的位置, 患者的臂是比较容易测量的位置。当臂不便于测量时, 建议替换腿的位置。
3) 根据产品适用范围列表, 选择适用患者的袖套。

操作注意事项:

- 1) 仅可将袖套和充气系统连接到非侵入性的血压监测系统上。
- 2) 不要将袖套连接到血管内流系统中, 这会使空气泵入血管, 从而导致病人严重受伤。
- 3) 为确保测量的精确性, 应尽量减少肢体和袖带的移动。
- 4) 监测时, 应避免触及袖带, 因为这样会导致血压值测量不精确。
- 5) 进行测量的频率不要超过临床需要的次数, 权衡频率测量的益处和风险。
- 6) 经常检查袖带包扎处和四肢, 看有无限制血液流动的征兆, 尤其是频繁监测和长时间监测时更应如此。必要时, 变换袖套的包扎位置。
- 7) 监测暂停时, 应将袖套从病人身上取下。
- 8) 不要将袖套包扎在用来进行静脉输注的肢体或其它血液流通会受到影响的部分。
- 9) 不要将袖套应用到皮肤不完整或组织受损的部位。确保袖套闭合处的毛面或勾面不接触皮肤, 否则会给病人造成刺激。
- 10) 如果袖套的宽度大于病人腋窝到肘部的长度时, 不要在胳膊的上半部使用袖套。

警告

1. 在使用前, 检查袖套、袖套管道系统和软管是否清洁无损。当袖套出现明显老化、撕裂或包裹不牢等现象时, 应予更换。
2. 选择适当的血压测量位置。使用前应检查病人的肢体。
3. 袖套还没包裹到病人身上时, 不要充气。
4. 使用时, 将袖套缠绕在病人胳膊的上半部份, 并确保臂周长在袖套测量范围内。
5. 袖套应缠绕松紧要适当, 在病人肢体和袖套之间保留两个手指的宽度。

产品消毒和清洁

- 1) 准备好酶清洁剂(美国产的 ENZOL® 或英国产的 Cidezyme® 酶清洁剂或等效产品及蒸馏水)和 10%的漂白剂, 分别盛于不同的喷雾瓶中。
- 2) 将清洁剂均匀地喷在袖套、管道系统和软管上, 如果污垢已干, 应等待清洁面上停留一分钟。
- 3) 用一块无尘布擦拭光滑的表面。有可见污渍或不规则表面的地方, 可用软毛刷刷净。
- 4) 用大量的蒸馏水淋洗。
- 5) 要进行消毒, 请在袖带上喷洒 10%漂白剂溶液, 直至饱和, 将产品放置 5 分钟。
- 6) 擦掉多余的溶液, 并再次用蒸馏水进行淋洗。让袖套自然风干。

图标释义



注意, 参考随附文件标记



产品生产批号标记



产品系列号标记



使用期限标记



生产日期标记



制造厂商标记



包装破损后不可使用标



0123 欧盟医疗设备指令 2007/47/EEC

运输与储存环境要求

产品须贮存在清洁卫生、干燥、通风的仓库内, 环境温度为-5℃~40℃, 相对湿度<85%, 仓库内应无有毒、有害、有腐蚀性的物品一同存放。保存有效期: 两年

产品运输时, 应注意运输工具必须清洁卫生, 运输过程中应注意防止雨雪的淋袭和强烈的碰撞和挤压。不得与有害、有毒、有腐蚀性的物品混运。

产品使用有效期: 六个月

制造厂家: 深圳市泰嘉电子有限公司

地址: 深圳市南山区松白公路百旺信工业 5 区 20 栋 5 楼

邮编: 518055

电话: 0755-81795727 81795618 传真: 0755-81795638

网址: [Http://www.taijia.com](http://www.taijia.com)